



ጠቃሚ

ምርመራዎን ማጠናቀቅ እና በተመዘገቡበት ቀን እስከ 8 ከምሽት መጣል/መመለስ አለብዎት። ከዚህ ጊዜ በኋላ የተጣሉ/የተመለሱ ናሙናዎች ይጣላሉ።

የታሰበ የጥቅም ዓላማ፣ በ CLIA ላቦራቶሪ ውስጥ ለሚደረግ የኢን ቪትሮ ምርመራ ዓላማ የሚሆን የአፍንጫ ፈሳሽ/ጥርጊትን በራስ-መሰብሰብ። ለህክምና ብቻ። ይህንን ምርት ለመጠቀም እድሜዎ 18 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን ወይም የወላጅ/አሳዳጊዎ ስምምነት ሊኖረዎት ይገባል።

ይህንን ኪት እንዴት እንደሚጠቀሙበት

1. ከተንቀሳቃሽ ስልክዎ ወይም ዲስክቶፕ ኮምፒተርዎ testyourself.dc.gov ይጎብኙ።
2. በድረ ገጹ ላይ ሲጠየቁ በናሙና ቱቦዎ ላይ የታተሙትን ሰማያዊ ቁጥሮች ያስገቡ።
3. በድረ ገጹ ላይ ሲጠየቁ በናሙና ቱቦዎ ላይ የታተሙትን ቀይ ቁጥሮች ያስገቡ።
4. ስምዎን፣ የስነሕዝብ መረጃዎን፣ እና የኢንፎርሜሽን መረጃዎን ያቅርቡ፣ የሚመለከተው ከሆነ።*
5. የአፍንጫ ፈሳሽን በራስ ጠርገው ይውሰዱ መመሪያዎች በጀርባው በኩል ይገኛል)።
6. በተገለቢጦሽ ገጽ ላይ እንደተገለጸው ኪትውን ያሸጉ።
7. ኪትውን በተመረመሩበት ተመሳሳይ ቀን በአቅራቢያዎ ወዳለው የመጠያ/ማስገቢያ ሳጥን እስከ 8 ከምሽት ይመልሱ። በ testyourself.dc.gov በአቅራቢያዎ ያሉ ጣቢያዎችን ያግኙ
8. ውጤቶችዎን በኢሜል (እና ከመረጡ፣ በጽሁፍ መልዕክት) ይቀበላሉ።

ለተጨማሪ የምርመራ ጣቢያዎች coronavirus.dc.gov/testing ይጎብኙ።

*የኢንፎርሜሽን መረጃ አያስፈልግም። የኢንፎርሜሽን መረጃን በመስጠት፣ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ለምርመራ ወጪ ከኢንፎርሜሽን ኩባንያዎ የገንዘብ ክፍያን ይፈልጋል። እርስዎ ለማንኛውም ክፍያዎች ተጠያቂ አይሆኑም፣ የጋራ-ክፍያዎችን ለማካተት፣ የኢንፎርሜሽን መረጃ አቅርቦት እንደሆነ ከግምት ሳይገባ።

ኃሬጃፍ ባዝሂ

ግመጋጫ ህሁወ ቱህል ህገጽህጋጅ/61-DI/02018

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA



ኪት የሚያካትተው፦

					
የናሙና ቱቦ	ፈሳሽ/ጥራጊ	የባዮሃሳር ቦርሳ	የታሽገ የፖስታ ወረቀትን ይመልሱ	የማስተማሪያ ካርድ	የውጭ እሽግ

የኪትዎ ይዘቶች ከሚታዩት ነገር በመልክ እና በቀለም ትንሽ ሊለያዩ ይችላሉ።

የምርመራ ውጤቶች ምርመራዎን ካስገቡ በግምት ከ3-5 የሥራ ቀናት ውስጥ ይገኛሉ።

ለድጋፍ፣ እባክዎን ወደ testingresults@dc.gov ኢሜይል ይላኩ

በራስ-መሰብሰቢያ መመሪያዎች

ለአን ሺትሮ የምርመራ ጥቅም


ከመጀመሪያ በፊት መመሪያዎችን በሙሉ በሙሉ ያንብቡ።



1. በዚህ ቡክሌት ውስጥ እንደተገለጸው ኪትዎን ይመዝግቡ። ካልተመዘገቡ፣ ውጤቶችን አያገኙም። እርስዎ መመዝገብ፣ መሰብሰብ፣ እና በዚያው ቀን ከምሽት 8 በፊት ኪትዎን መመለስ አለብዎት።



2. ከመቀጠልዎ በፊት እጅዎን ይታጠቡ እና ያድርቁ (ወይም ሳኒታይዘር ይጠቀሙ)። ሁሉንም ዕቃዎች በንጹህ ስፍራ ላይ ያስቀምጡ።

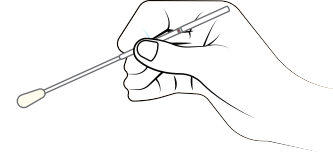


3. የጥጥ መጥረጊያን ይክፈቱ እና መጥረጊያውን በሽል ይያዙ። ጫፍን አይንኩ። በኪትዎ ውስጥ በርካታ መጥረጊያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንድ ብቻ ነው የሚያስፈልግዎት እና ሌላ ማናቸውንም መጥረጊያዎችን (ፈሳሾችን) ሊያስወግዱ ይችላሉ።




4. የመሰብሰቢያ ቱቦውን ኪዳን ይንቀሉ። መጥረጊያው/ጥራጊውንን በአንድ እጅ እና የመሰብሰቢያ ቱቦውን በሌላኛው እጅ ይያዙ። ፈሳሾችን እንዳይፍስሱ ይጠንቀቁ። ፈሳሾችን አይጠቡ።

ይህ ጫፍ ሙሉ በሙሉ ወደ አፍንጫዎ ቀዳዳ መሄድ አለበት።

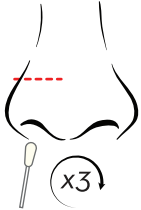


5. መጥረጊያውን አንድ የአፍንጫ ቀዳዳ ውስጥ ያስገቡ- የመጥረጊያው ጫፍ መጥረጊያው እስከማይታይ ድረስ መግባት አለበት። መጥረጊያውን የአፍንጫ ቀዳዳዎ ሙሉ ስፍራ ውስጥ ቢያንስ ሶስት ጊዜ ያሽከርክሩ።

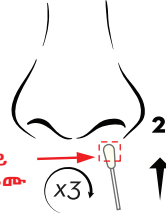

+መሳሳይ ጫፍ ይጠቀሙ

6. መጥረጊያውን ከአፍንጫዎ ያውጡ፣ እና የመጥረጊያ አሰራሩን በሌላ ቀዳዳ ውስጥ እንደበፊቱ የመጥረጊያ ተመሳሳይ ጫፍ በመጠቀም ይደገሙት።


+መሳሳይ ጫፍ

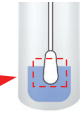

7. መጥረጊያውን ከአፍንጫዎ ያውጡ እና መጥረጊያውን መሰብሰቢያ ቱቦ ውስጥ ያስገቡ። በአፍንጫዎ ውስጥ የነበረው የመጥረጊያው ጫፍ መጀመሪያ ውደ ቱቦ ውስጥ እና በፈሳሽ ውስጥ መግባት አለበት። የመሰብሰቢያ ቱቦውን ኪዳን በጥብቅ ይክርክሩ።



8. አሁንም እጆችዎን ደግመው ይታጠቡ እና ያድርቁ (ወይም ሳኒታይዘር ይጠቀሙ) የመሰብሰቢያ ቱቦውን ወደ ባዮአዘርድ የኖሙና ቦርሳ ውስጥ ያስገቡ። የዚፕ ቁልፍን ሙሉ በሙሉ በመዝጋት የኖሙና ቦርሳውን ያሸጉ።

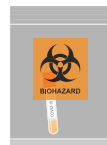

9. የኖሙና ቦርሳውን ወደ መመለሻ የፖስታ ወረቀት ውስጥ ያስገቡ። የማጣበቂያውን መስመር ያስወግዱ እና ፖስታውን ያሸጉ። ውጤቶችዎን ለማምጣት ምናልባት እገዛ ካስፈለገዎ መመሪያዎችን ማስቀመጥዎን እርግጠኛ ይሁኑ። ሌሎች ሁሉም ቁሳቁሶች ሊጣሉ ይችላሉ።



10. የማስቀመጫ/መመለሻ ፖስታውን ኖሙናዎን በሚሰበስቡበት ተመሳሳይ ቀን እስከ ምሽት 8 ከዲስትሪክቱ የኖሙና መሰብሰቢያ ሳጥኖች ወደ አንዱ ይጣሉ። በአቅራቢያዎ ያለውን የቅርብ ሳጥን በ testyourself.dc.gov ማግኘት ይችላሉ።